



MK VIBRAČNÍ PLOŠINA

ORIGINÁLNÍ VIBRAČNÍ PLOŠINA PRO KONĚ



REVOLUČNÍ VIBRAČNÍ PLOŠINA PRO KONĚ
NAVRŽENO A VYROBENO SPOLEČNOSTÍ MOLENKONING

JAK TO FUNGUJE




Vibrace jsou vytvářeny motory na horní straně plošiny. Vibrace procházejí kopyty a zasahují do celého těla a spouštějí přirozenou reakci ve svaích, které se mimoděk stahují a uvolňují 30 až 50krát za sekundu, v závislosti na frekvenci, na kterou je stroj nastaven. Díky této stretch-reflexní kontrakci se používá více svalových vláken než při vědomém, dobrovolném pohybu.

Opakovaná akce sval unavuje a jak se zotavuje, posiluje, aby vydržel zvýšenou námahu. Stimuluje také krevní oběh v celém těle. Zvýšený průtok krve zlepšuje okysličení tkání, což napomáhá odstraňování toxinů a metabolických odpadů, čímž se zlepšuje schopnost těla se samo léčit.


VÝHODY POUŽÍVÁNÍ VIBRAČNÍ PLOŠINY PRO KONĚ

- 👑 Zlepšený krevní oběh a lymfodrenáž.
- 👑 Zlepšení pohybového aparátu a doby hojení měkkých tkání.
- 👑 Zvýšená rychlost růstu kopyt a hustota kostí.
- 👑 Větší pohyblivost kloubů a flexibilitu.
- 👑 Zvýšená svalová síla a tonizace svalů.
- 👑 Zahřátí před tréninkem.
- 👑 Ochlazení po cvičení.
- 👑 Ideální pro boxové koně, odpočinek nebo redukovaný trénink.
- 👑 Long - Slow - Distance(LSD) pro dlouhou pomalou práci.
- 👑 Kondice a udržování úrovně kondice.
- 👑 Lze snadno integrovat do každodenní rutiny.

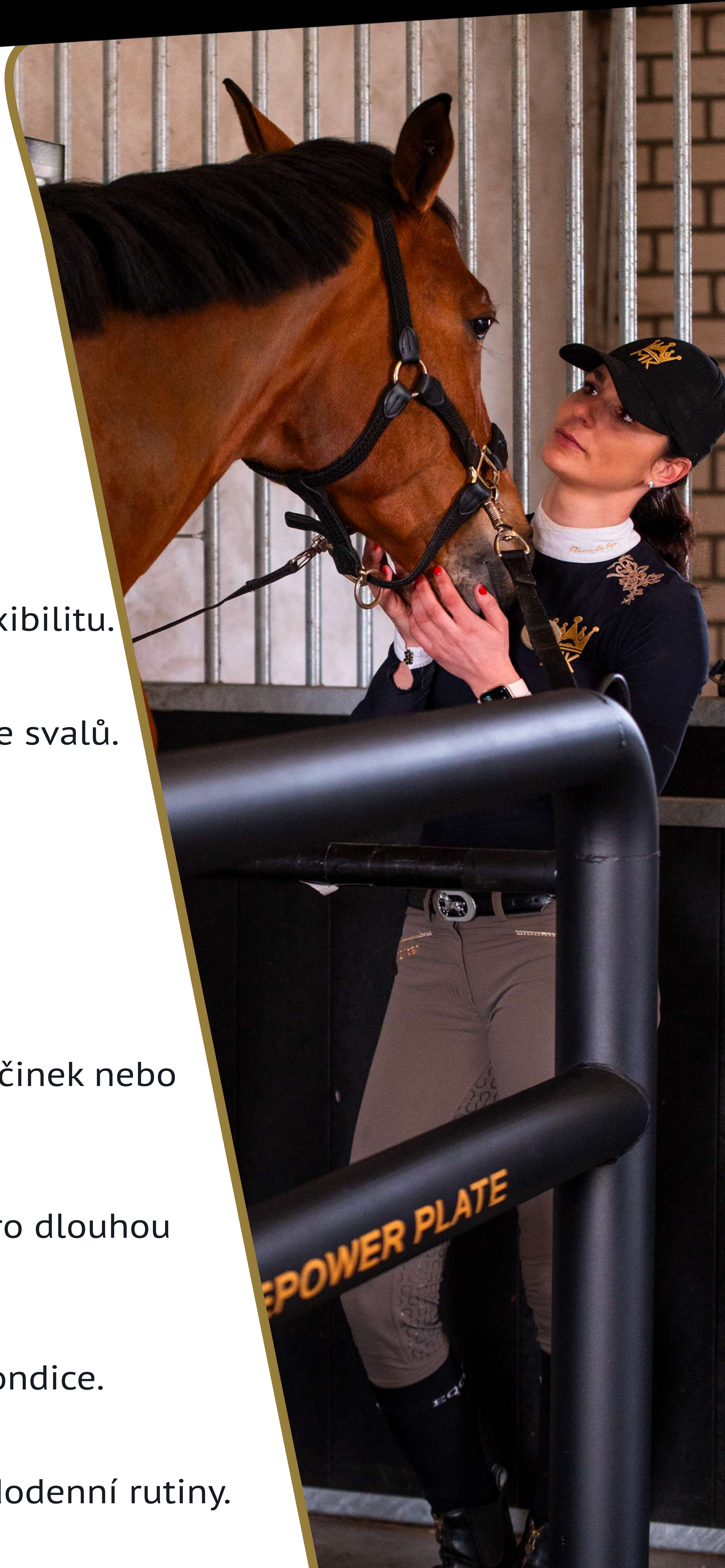

PROČ BY JSTE MĚLI ZVOLIT VIBRAČNÍ PLOŠINU

“Vertikální vibrace lze dosáhnout pouze se dvěma motory, které jsou dokonale sladěny s přesně stejnou frekvencí”

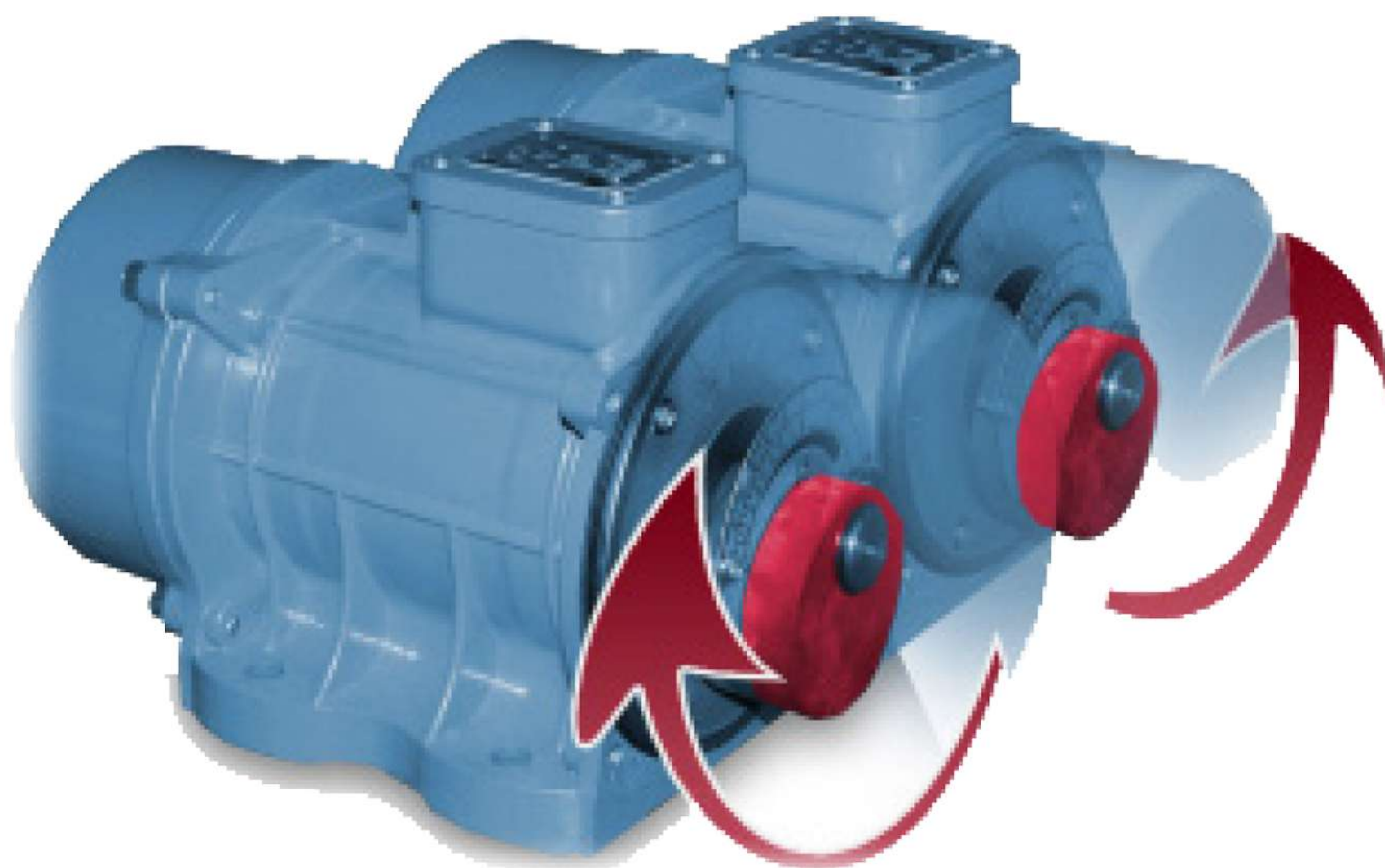

Existují dva druhy vibrací, oscilační (pohyb ze strany na stranu nebo horizontální vibrace) a vertikální vibrace (vibrace nahoru a dolů). Naše vibrační plošina produkuje vertikální vibrace, takže poskytuje intenzivnější trénink a intenzivněji získává více svalových vláken. Horizontální nebo oscilační plošiny mohou zatěžovat klouby a vazy, což působí na tělo nepřírodným způsobem. MK Vibrační plošina je jediná vibrační deska dostupná na trhu, která využívá dva motory, které jsou dokonale synchronizované, aby produkovaly stejnou frekvenci, takže vytvářejí skutečné vertikální vibrace.

INFORMACE JAK POUŽÍVAT VIBRAČNÍ PLOŠINU

Vibrační plošina může být používána pro různé účely:

- 👑 Špatný růst kopyt
- 👑 Artróza
- 👑 Poranění šlachy
- 👑 Kolika
- 👑 Prevence poranění

Doporučujeme dát koně na vibrační plošinu 1- 2 krát denně na 10 až 20 minut, v závislosti na vašich cílech.

Poradte se se svým veterinářem, pokud používáte vibrační plošinu pro jakékoli použití při rehabilitaci zranění.



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Specifikace	Podrobnosti
Povrch	Žárově pozinkovaná ocel
Délka	209 cm
Šířka	116 cm
Výška	129 cm
Váha	350 kg
Elektrický výkon	230V - 16 A
Povrch desky	Protiskluzová guma
Ovládání	Ovládací box s dotykovou obrazovkou a s tlačítkem nouzového zastavení



KONTAKTUJTE NÁS



OBJEDNEJTE DNES !

Zašleme Vám vibrační desku až domů

👑 Dodání do max. 7 dní ve všech zemích EU.

👑 Mimo Evropu zkontrolujte dodací lhůtu.



Neváhejte mě kontaktovat.

☎ +420 777 556 427

📞 +420 777 556 427

✉ marcela@molenkoning.com

🌐 www.molenkoning.com

📍 Molenkoning BV
25063 Nový Brázdím 107,
Praha východ

📌 Molenkoning Česká republika



📷 [molenkoning_ceska_republika](https://www.instagram.com/molenkoning_ceska_republika)